


symmed

ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΣ

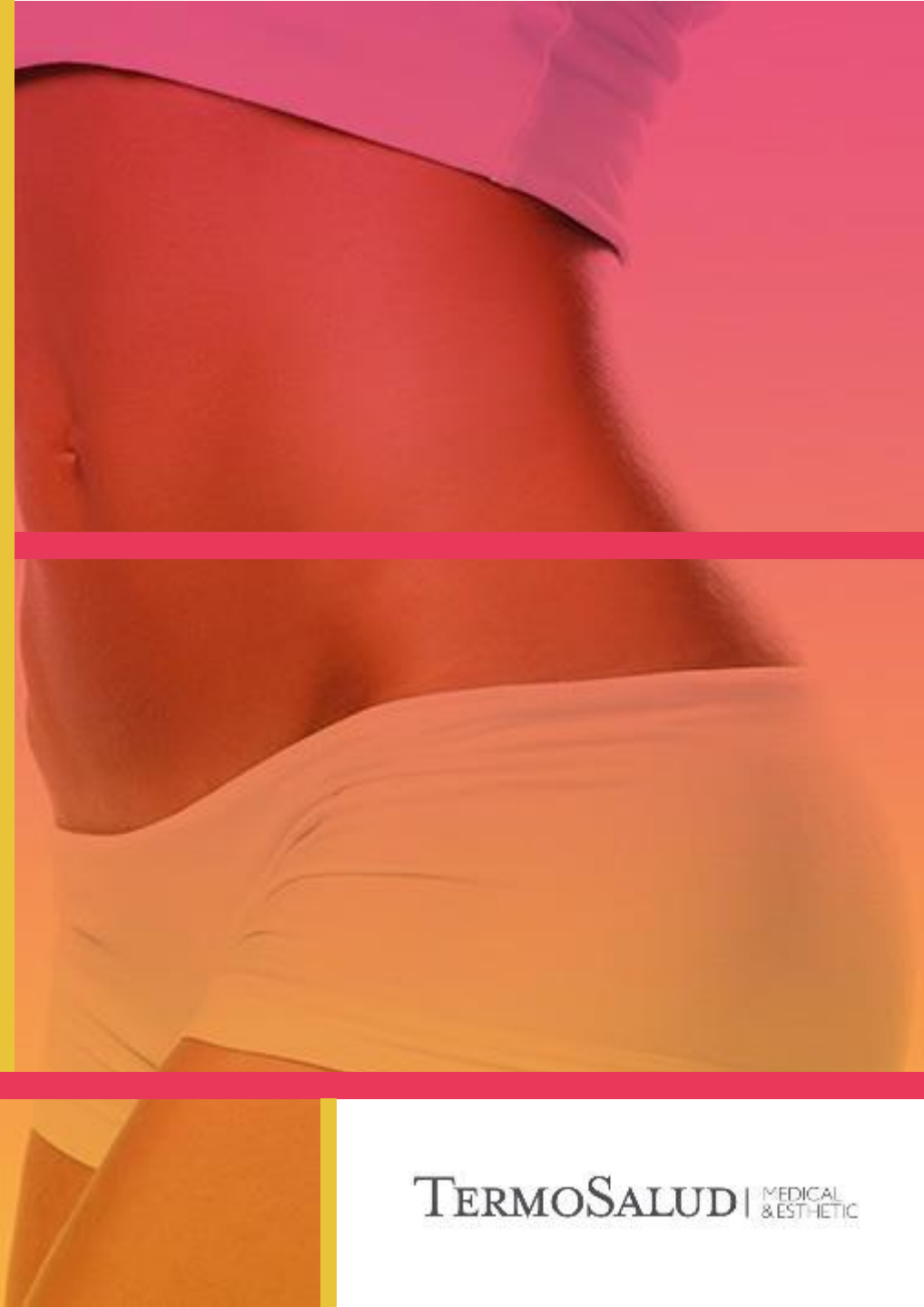

TERMO SALUD | MEDICAL
& ESTHETIC




Το **Symmed** είναι ένα MEDICAL AESTHETIC DEVICE

σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο από την:

TERMO SALUD | MEDICAL & ESTHETIC



ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
448 kHz

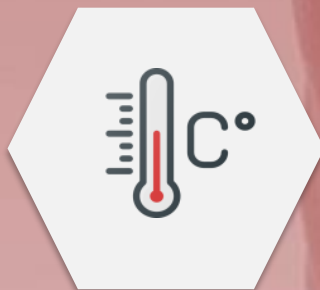

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
θερμικά και υποθερμικά
αποτελέσματα



CAPACITIVE
MODE
550 VA



RESISTIVE
MODE
200W

Είναι ένα WORLD CLASS μηχάνημα
Σύμφωνα με την πιο προηγμένη και ευέλικτη
τεχνολογία που διατίθεται στον ιατρικό τομέα.



ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Αναδιαμόρφωση & Αντιμετώπιση της Κυτταρίτιδας (βαθμός I, II and III)

Λιπολιτικό αποτέλεσμα.

Ενεργοποίηση του μεταβολισμού.

Αποτέλεσμα στην κατακράτηση υγρών.

Σύσφιξη και Τόνωση

Βελτίωση της ελαστικότητας και της ενυδάτωσης του δέρματος.

Ενίσχυση της σύνθεσης κολλαγόνου, ελαστίνης και υαλουρονικού οξέος.

Αύξηση της διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης.

Λεμφική αποστράγγιση και μασάζ για το κυκλοφορικό

Ευνοεί την μικροκυκλοφορία του αίματος και των λεμφαγγείων.

Ομαλή κυκλοφορία λεμφικού υγρού στο λεμφικό σύστημα.


Βοηθάει στο λεμφοίδημα και/ή στο οίδημα.

Αντιγήρανση

Ρύθμιση της έκκριση σμήγματος.

Μείωση των ελεύθερων ριζών.

Αύξηση της διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης.

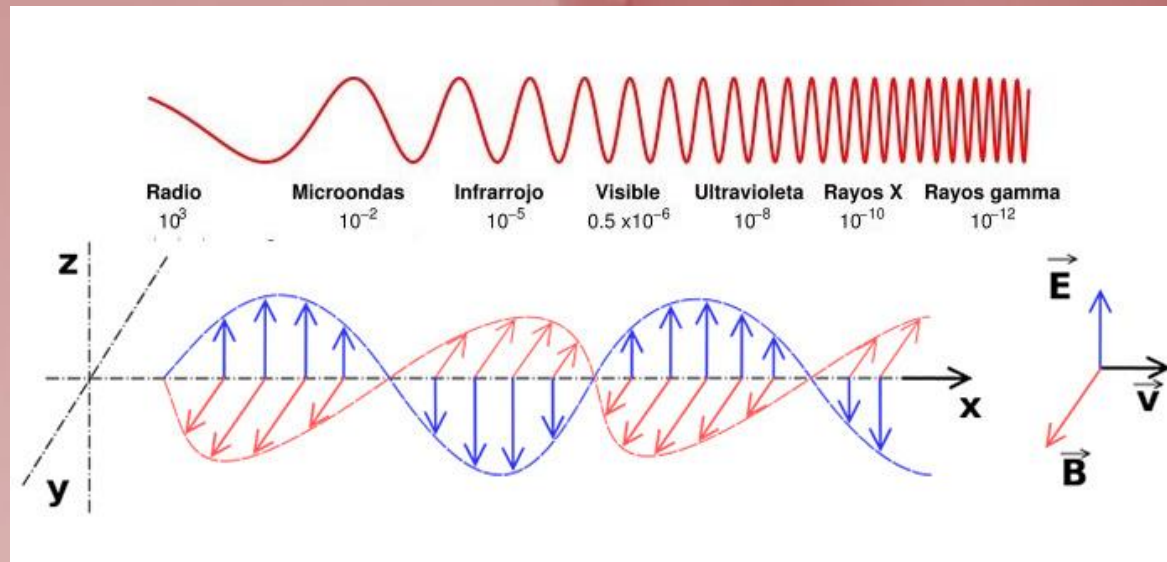


Ηλεκτρομαγνητικά κύματα μεγάλης συχνότητας.

Το Symmed λειτουργεί σε μία συγκεκριμένη συχνότητα στα 448 kHz.

RADIOFRECUENCIA
ANTIAGING + BODYCONTOURING
CAPACITIVA / RESISTIVA

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Τα μόρια νερού σε σχέση με το ρεύμα ραδιοσυχνότητας του Symmed.

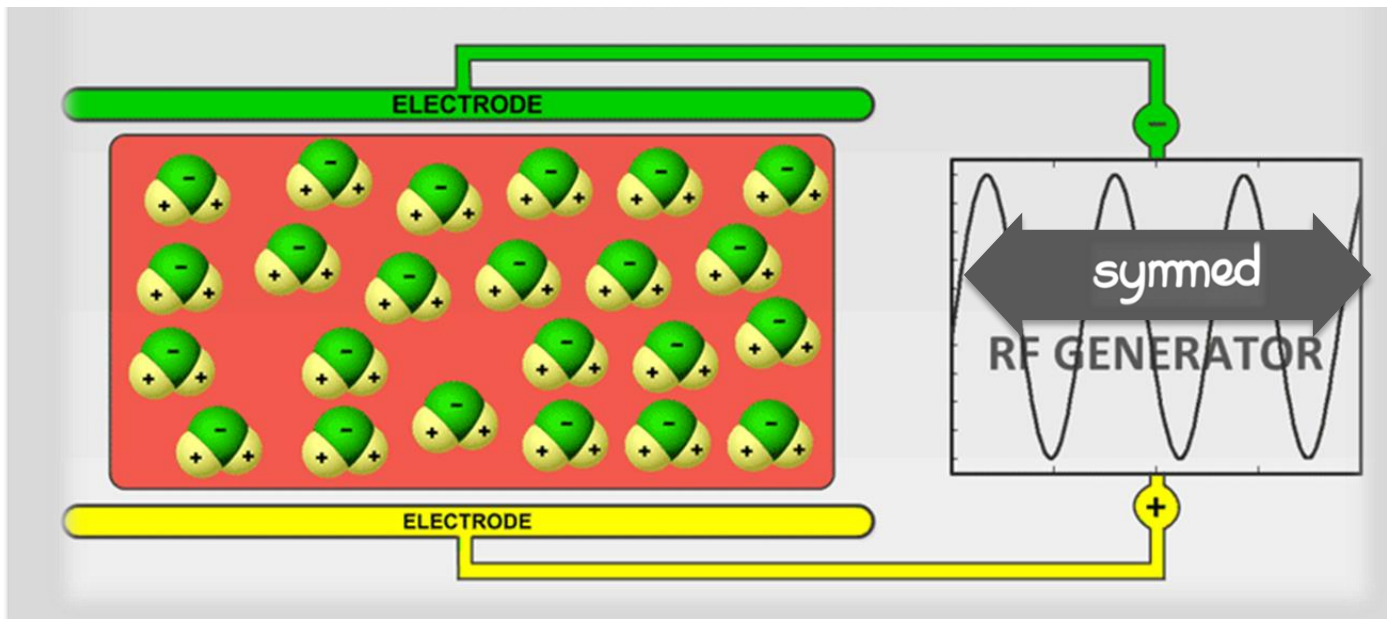

● $f = 0.5 \text{ Hz}$
 $T = 2.0 \text{ s}$

● $f = 1.0 \text{ Hz}$
 $T = 1.0 \text{ s}$

● $f = 2.0 \text{ Hz}$
 $T = 0.5 \text{ s}$



Θερμότητα

448 kHz = 448.000 φορές το δευτερόλεπτο

RADIOFRECUENCIA
ANTIAGING + BODYCONTOURING
CAPACITIVA / RESISTIVA


ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Το Symmed εκπέμπει ραδιοσυχνότητα στα 448 kHz μέσω ειδικών ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΩΝ ηλεκτροδίων:

- CAPACITIVE (ηλεκτρικά απομονωμένο από βιοσυμβατό υλικό)



- RESISTIVE (μη απομονωμένο)

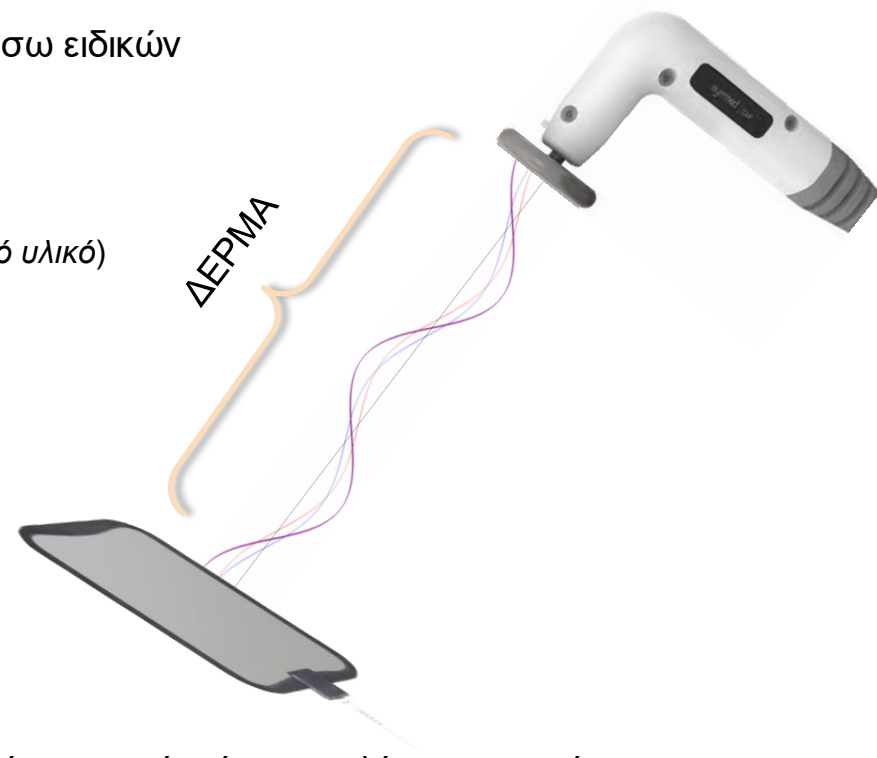


Τα ταχέως ταλαντευόμενα ηλεκτρικά ρεύματα περνούν μέσα από τους ιστούς μέχρι την πλάκα επιστροφής.

RADIOFRECUENCIA
ANTIAGING + BODYCONTOURING
CAPACITIVA / RESISTIVA

ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


RESISTIVE

- ΜΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ
- ΙΣΤΟΙ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ
- ΒΑΘΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

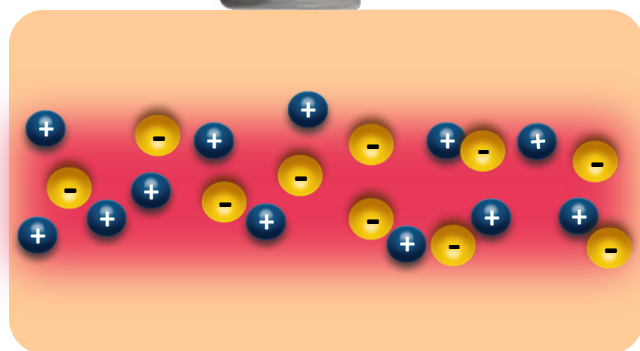

CAPACITIVE

- ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ
- ΙΣΤΟΙ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ
- ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

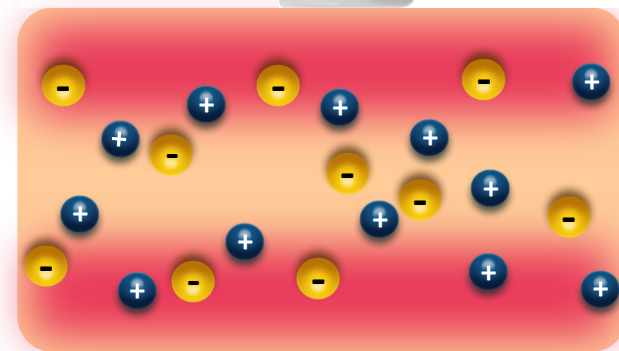

RADIOFRECUENCIA
ANTIAGING + BODYCONTOURING
CAPACITIVA / RESISTIVA

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



ΑΘΕΡΜΙΑ

BIOSTIMULATION

Ενεργοποίηση των μηχανισμών πολλαπλασιασμού, ανάπλασης/επανόρθωσης και αποκατάστασης των κυττάρων.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ/ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



ΘΕΡΜΙΑ


VASCULARIZATION

Αύξηση της τοπικής ροής αίματος και βελτίωση της οξυγόνωσης και διατροφής των ιστών.

ΝΕΑ ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ

ΡΟΗ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ

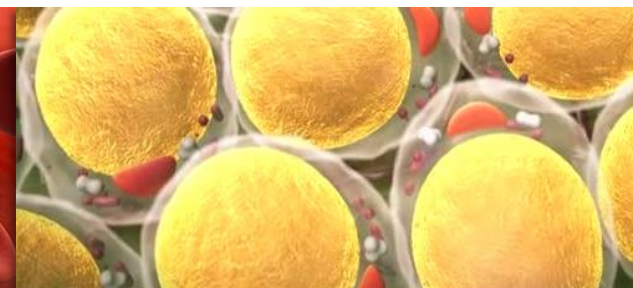

ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ


HYPERACTIVATION

Διέγερση μεταβολικών διεργασιών και κυτταρικής δραστηριότητας.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΣΥΣΦΙΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ
ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ, ΕΛΑΣΤΙΝΗ ΚΑΙ GLUCOSAMINE ΣΑΚΧΑΡΑ
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ
ΛΙΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΛΙΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ

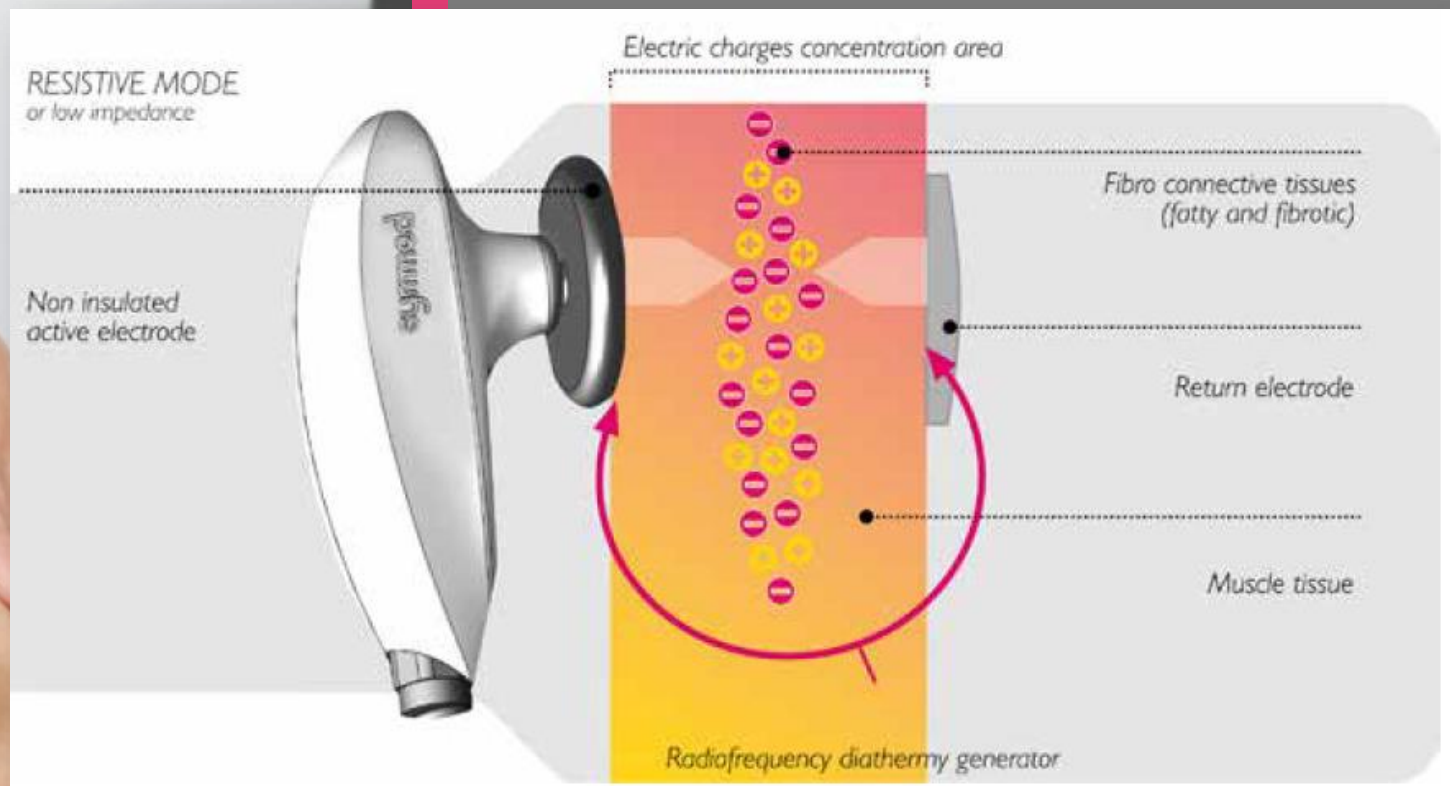

symmed

RESISTIVE ELECTRODE *Remodelage* RET


ΒΑΘΙΑ ΔΡΑΣΗ

ΙΝΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ / ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΣΗ / ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ




symmed

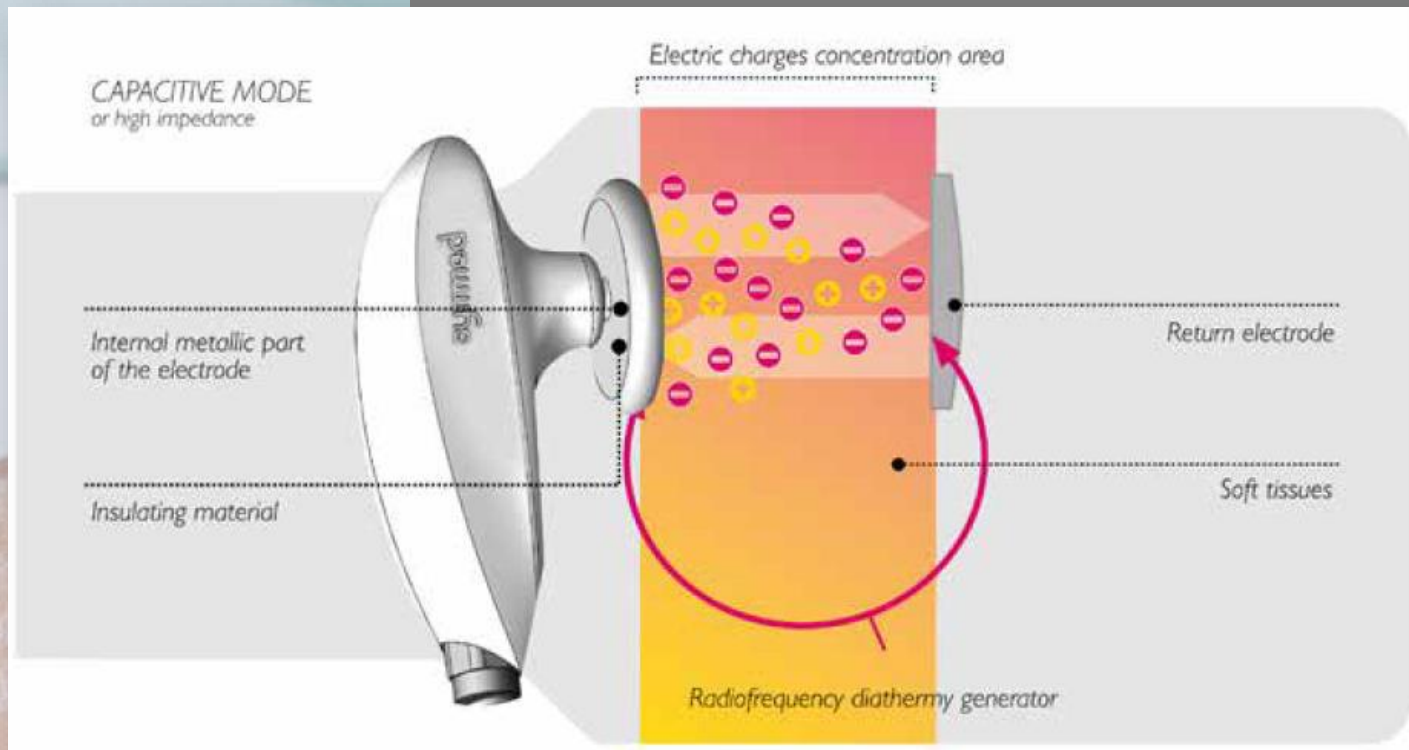

RADIOFRECUENCIA
ANTIAGING + BODYCONTOURING
CAPACITIVA / RESISTIVA


ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΡC

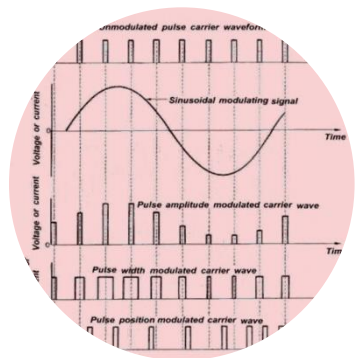

ΣΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
εικονική μεσοθεραπεία



CAPACITIVE
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

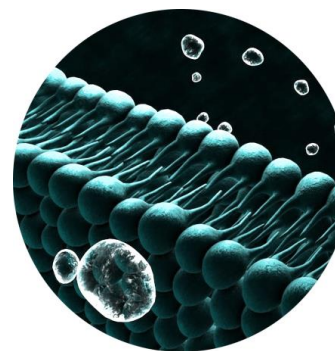

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ



ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Δραστικά συστατικά εξειδικευμένων καλλυντικών
φθάνουν στο εσωτερικό των κυττάρων.

RADIOFRECUENCIA
ANTIAGING + BODYCONTOURING
CAPACITIVA / RESISTIVA

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ



- Μειώνουν την αντίσταση του δέρματος.
- Ενισχύουν τα αποτελέσματα της θεραπείας.

ΤΥΠΟΙ:

- Εξειδικευμένα καλλυντικά κατά της κυτταρίτιδας/λίπους
- Εξειδικευμένα καλλυντικά για σύσφιξη
- Εξειδικευμένα καλλυντικά για αντιγήρανση/τόνωση



RADIOFRECUENCIA
ANTIAGING + BODYCONTOURING
CAPACITIVA / RESISTIVA

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

4 έως 8 συνεδρίες μία φορά την εβδομάδα (15-25 λεπτά)

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

12 έως 16 συνεδρίες μία/δύο φορές την εβδομάδα (20-50 λεπτά)




symmed
ANTIAGING + BODY CONTOURING

ΠΡΑΚΤΙΚΗ




FACIAL TREATMENTS

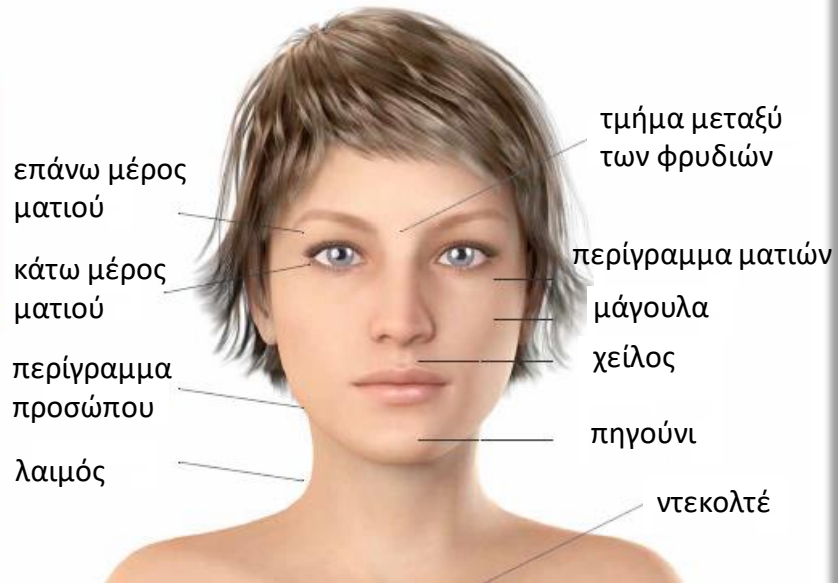

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (I)

- 🌀 Το πρόσωπο πρέπει να είναι **ΚΑΘΑΡΟ** και **ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΕΝΟ**.
- 🌀 Ευαίσθητο δέρμα ή δέρμα με διαταραχές αγγείων (πχ *ευρυαγγείες*): **Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ**.
- 🌀 Χρησιμοποιήστε την τεχνική **HAND-ELECTRODE** για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και το κρύωμα του δέρματος.

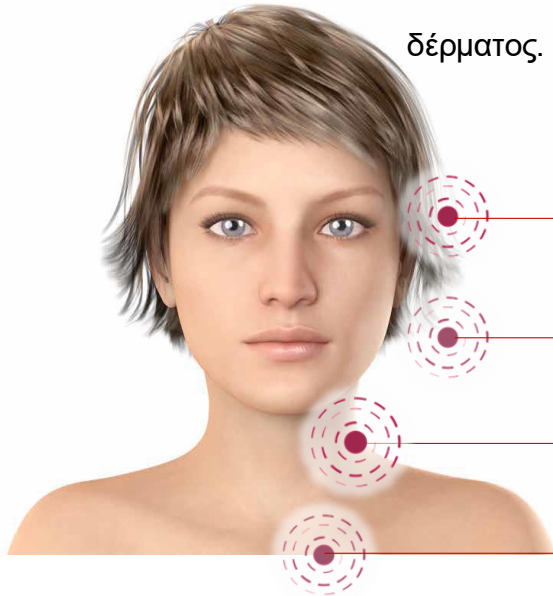

ΜΑΤΙΑ: Χρησιμοποιήστε εξωτερικές γραμμικές κινήσεις στο κάτω μέρος του ματιού.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ: οι κινήσεις πρέπει να ακολουθούν την κατεύθυνση των μυών κάτω από το πηγούνι, τα ζυγωματικά και το μέτωπο.

ΛΑΙΜΟΣ: οι κινήσεις πρέπει να πηγαίνουν προς τα έξω στις πλευρές και προς τα πάνω αφήνοντας την περιοχή του θυρεοειδή ελεύθερη.

ΝΤΕΚΟΛΤΕ: οι κινήσεις πρέπει να πηγαίνουν προς τους ώμους.

ΡΥΤΙΔΕΣ: Χρησιμοποιήστε επαναλαμβανόμενες κυκλικές κινήσεις.

ΆΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Χρησιμοποιήστε κυκλικές κινήσεις προς τις πλευρές όλου του προσώπου ακολουθώντας την κατεύθυνση των μυών.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (II)



RETURN PLATE τοποθετείται στην αντίθετη πλευρά μακριά από την περιοχή της θεραπείας.

ΚΑΘΑΡΟ και **ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ**.

Χρησιμοποιήστε την τεχνική **HAND-HANDPIECE**.

Οι κινήσεις πρέπει να είναι πάντα με κατεύθυνση πάνω από το λεμφαδένα.
ΣΤΑΘΕΡΕΣ και **ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ** με το δέρμα.

Χρησιμοποιήστε εξειδικευμένα **ΚΑΛΥΝΤΙΚΑ SYMMED**.

symmed

TERMO**SALUD** | MEDICAL
& ESTHETIC

symmed

RADIOFRECUENCIA
ANTIAGING + BODYCONTOURING
CAPACITIVA / RESISTIVA



symmed

Mujer 57años / SYMMED 6 sesiones



PRIN



META

symmed

RADIOFRECUENCIA
ANTIAGING + BODYCONTOURING
CAPACITIVA / RESISTIVA



Hombre 43 años / SYMMED 6 sesiones



PRIN



META

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

DERMACON ΕΠΕ: Δελφών 5 & Κηφισίας 15233 Αθήνα, Τ. 210 6777540,
F. 210 6745201, S. www.dermacon.gr, E. dermacon@dermacon.gr

TERMO SALUD | MEDICAL
& ESTHETIC

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ & ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

DERMACON ΕΠΕ: Δελφών 5 & Κηφισίας 15233 Αθήνα, Τ. 210 6777540,
F. 210 6745201, S. www.dermacon.gr, E. dermacon@dermacon.gr