

HydroFusion 7

7 θεραπείες σε 1



Η τεχνολογία **Hydrafacial** είναι μια μη επεμβατική θεραπεία αναζωογόνησης του προσώπου πολλαπλών βημάτων, που προσφέρει άμεσα αποτελέσματα.

Το **HydroFusion 7** της **Medi-Nova** είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα θεραπειών προσώπου.

Συνδυάζει τα οφέλη 2 περιζήτητων θεραπειών προσώπου – Βαθύς καθαρισμός και ενυδάτωση με την κεφαλή **Hydropeeling** και βαθιά απολέπιση με την καινοτόμο κεφαλή **BOHR**.

Παράλληλα το **HydroFusion 7** διαθέτει άλλες 5 τεχνολογίες για να δώσετε στους πελάτες σας ολοκληρωμένες λύσεις θεραπειών προσώπου για πιο λαμπερό, καθαρό, φωτεινό και νεανικό δέρμα.



Το **HydroFusion 7** συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της υδροδερμοαπόξεσης, του χημικού peeling, της εξαγωγής του σμήγματος και της απολέπισης προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη λύση καθαρισμού του προσώπου.

Παράλληλα διαθέτει κεφαλές ιοντοφόρησης, πολυπολικής ραδιοσυχνότητας, υπερήχων, οξυγονοθεραπείας και ψύξης-θέρμανσης για μια **ολοκληρωμένη θεραπεία προσώπου με άμεσο αποτέλεσμα.**

- Βαθύς καθαρισμός του δέρματος, βελτίωση της θαμπής όψης, βελτίωση της υφής του δέρματος
- Αναζωογονεί το δέρμα προσφέροντας παράλληλα ενυδάτωση και θρέψη
- Σύσφιξη δέρματος και πόρων, αύξηση της διαφάνειας του δέρματος, βελτίωση του οβάλ του προσώπου
- Φροντίδα των ματιών – εξάλειψη των μαύρων κύκλων και του πρηξίματος



Το Medi-Nova Hydrofusion 7 διαθέτει 7 διαφορετικές κεφαλές, ικανές να καλύψουν κάθε ανάγκη του δέρματος.

Κεφαλή HydroPeeling

Βαθύς καθαρισμός του δέρματος, εξαγωγή σμύγματος, αφαίρεση των νεκρών κυττάρων και των μαύρων στιγμάτων. Χρησιμοποιείται με διαλύματα οξέων AHA-BHA (βήμα 1 και 2) καθώς και ενυδατικό διάλυμα στο 3^ο βήμα.



Κεφαλή BOHR

Χρησιμοποιείται για βαθιά απολέπιση και αντιμετώπιση της μελάγχρωσης του δέρματος. Χρησιμοποιεί κάψουλα με ενεργά συστατικά (Kojic Acid, Retinol) απελευθέρωση οξυγόνου στους ιστούς. Επιτυγχάνει βαθύ καθαρισμό, οξυγόνωση και απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων του δέρματος, για μια λεία επιδερμίδα.



Κεφαλή Ιοντοφόρεσης

Χρησιμοποιείται για διέγερση του δέρματος και των μυών του προσώπου, δίνοντάς του ελαστικότητα.

Κεφαλή Πολυπολικής Ραδιοσυχνότητας

Πολυπολικό (6-pole) RF για τη διέγερση του κολλαγόνου και τη βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος. Ασφαλής και ανώδυνη θεραπεία με άμεσο αποτέλεσμα.

Κεφαλή Υπερήχων

Ο υπέρηχος βοηθά στη λιποδιάλυση, διατηρεί την υφή του δέρματος λεία και ενισχύει την απορρόφηση των σκευασμάτων.

Κεφαλή Ψύξης-Θέρμανσης

Σύστημα ψύξης και θέρμανσης για τη συστολή και διαστολή των πόρων.
Ενίσχυση της απορρόφησης των σκευασμάτων και σφράγιση της υγρασίας.



Κεφαλή Jet Οξυγονοθεραπείας

Κεφαλή οξυγονοθεραπείας τεχνολογίας Jet για μέγιστη
ενυδάτωση.





Τεχνολογία Hydro Skin Peeling

Είναι μη επεμβατική, οικονομική θεραπεία για την ανάπλαση του δέρματος. Παρέχει βαθύ καθαρισμό και ενυδάτωση, ενώ παράλληλα βοηθά στην εξαγωγή.

Τα AHA, όντας διάσημα για τις απολεπιστικές τους ικανότητες, απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα από την επιδερμίδα, κάνοντάς την έτσι πιο λεία και λαμπερή.

Τα BHA διαθέτουν καταπραϋντικές ιδιότητες. Καταπολεμούν τα βακτήρια, είναι αρκετά απαλά για ευαίσθητους τύπους δέρματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι επιρρεπείς σε ερυθρότητα ή ροδόχρου ακμή.



BOHR Handle



Τεχνολογία BOHR

Η κεφαλή BOHR χρησιμοποιείται για βαθιά απολέπιση και αντιμετώπιση της υπερμελάγχρωσης. Χρησιμοποιεί μια κάψουλα απολέπισης με ενεργά συστατικά, όπως το Kojic Acid (αναστέλλει τον σχηματισμό τυροσίνης, απαραίτητο αμινοξύ για παραγωγή μελανίνης) και η Ρετινόλη.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας παράγεται διοξείδιο του άνθρακα, προκαλώντας απελευθέρωση οξυγόνου από την αύξηση των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Το οξυγόνο απελευθερώνεται φυσικά στο δέρμα από τις βαθύτερες στοιβάδες, οδηγεί σε πραγματική οξυγόνωση και είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Αυτή η δράση στο δέρμα βασίζεται στο «Φαινόμενο Bohr».



Iontophoresis

Τεχνολογία Ιοντοφόρησης

Η τεχνολογία ιοντοφόρησης χρησιμοποιείται για ανόρθωση δέρματος και αυξάνει την απορροφητικότητα για διείσδυση του προϊόντος.

Χρησιμοποιώντας την κεφαλή της ιοντοφόρησης, επιτυγχάνεται η βαθύτερη διείσδυση των ορών στο δέρμα, αλλά δίνει επίσης μια ελαφριά μυϊκή σύσπαση και αποτέλεσμα ανύψωσης.



Multipolar RF

Τεχνολογία Πολυπολικής Ραδιοσυχνότητας

Η τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιείται για τη διέγερση της παραγωγής κολλαγόνου. Αποτελεί ιδανική τεχνολογία για σύσφιξη και αντιγήρανση.

Η ραδιοσυχνότητα μεταφέρει τη θερμότητα στο χόριο, αυξάνοντας τη θερμοκρασία στους 40-42°C. Με τη θέρμανση του χορίου προκαλείται διέγερση κυττάρων κολλαγόνου.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή νέου κολλαγόνου, αύξηση της διαμέτρου του κολλαγόνου και τη μείωση των κενών μεταξύ των ινών αυξάνοντας την πυκνότητα, δίνοντας ένα αποτέλεσμα σύσφιξης του δέρματος.



Ultrasound

Τεχνολογία Υπερήχων

Ο υπέρηχος που χρησιμοποιείται σε αισθητικές εφαρμογές έχει Θερμικές και Βιοχημικές επιδράσεις.

Η θερμική του επίδραση έχει διεγερτική δράση στη ροή του αίματος και ενεργοποιεί τον μεταβολισμό των κυττάρων.

Οι βιοχημικές επιδράσεις πυροδοτούν ένα μικρο-μασάζ στον ιστό, το οποίο επηρεάζει τους ινοβλάστες και διεγείρει το σχηματισμό νέου κολλαγόνου.

Η συχνότητα του υπερήχου επιτρέπει σε περισσότερα ενεργά συστατικά να διεισδύσουν στον φραγμό του δέρματος.




Τεχνολογία Cooling & Heating

Χρησιμοποιώντας το θερμό απλικατέρ (42°C), αυξάνεται η θερμοκρασία του δέρματος για να ανοίξουν οι πόροι, να αυξηθεί η παροχή αίματος, να βοηθήσει την έγχυση του προϊόντος και να ενισχύσει το δέρμα.

Φέρνοντας επανειλημμένα το δέρμα σε θερμοκρασία 42°C, αυτό βοηθά στη δημιουργία πρωτεϊνών θερμικού σοκ.

Αυτές είναι οι πρωτεΐνες που παράγονται από τα κύτταρα ως απόκριση στην έκθεση σε στρεσογόνες συνθήκες. Βοηθούν στην αποκατάσταση του δέρματος και ενισχύουν την ελαστικότητα του δέρματος. Οι 42°C βοηθούν στη διαστολή των πόρων για βαθύ καθαρισμό.

Με τη χρήση του κρύου απλικατέρ (5°C), οι πόροι συσφίγγουν αμέσως, μειώνεται η επιφανειακή παροχή αίματος δίνοντας ένα στιγμιαίο αποτέλεσμα φωτεινότητας και σύσφιξης στο δέρμα και επίσης «σφραγίζει» την υγρασία.

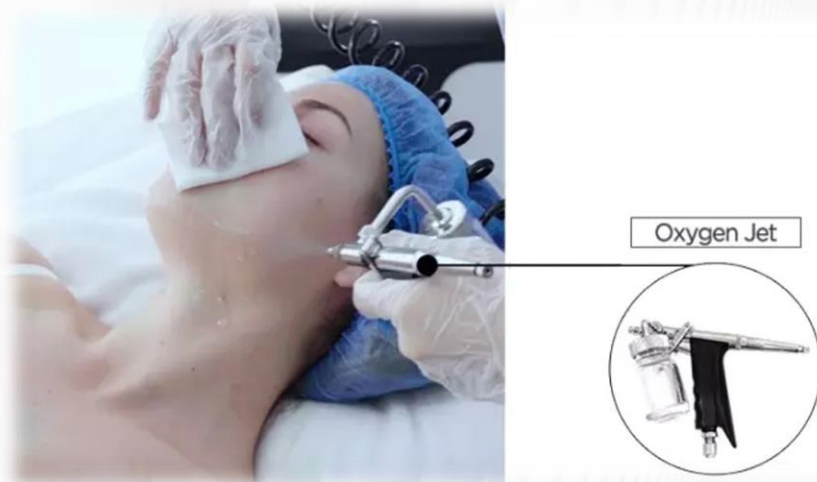

Τεχνολογία Οξυγονοθεραπείας

Η κεφαλή Oxygen Jet ενθαρρύνει τη μέγιστη απορρόφηση επιτρέποντας την έντονη ενυδάτωση του δέρματος. Η εφαρμογή οξυγονοθεραπείας στο δέρμα βοηθά στην αύξηση του μεταβολισμού των κυττάρων αλλά έχει και αντιβακτηριδιακή δράση στα αναερόβια βακτήρια.

Πρόκειται για μια θεραπεία αναζωογονητική, μη ερεθιστική και άμεσα αποτελεσματική. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές περιποιήσεις προσώπου, εκτελείται μέσω συσκευής και όχι με το χέρι, για βαθύτερη διείσδυση και αποτελέσματα μεγαλύτερης διάρκειας.

Εφαρμογές

Βαθύς καθαρισμός

Απολέπιση

Ανανέωση του
δέρματος

Θρέψη του δέρματος

Αναζωογόνηση
του δέρματος

Lifting προσώπου

Αφαίρεση
μαύρων στιγμάτων

Αντιμετώπιση
υπερμελάγχρωσης

Απολέπιση
Απομάκρυνση νεκρών
κυττάρων

Ολοκληρωμένη
περιποίηση προσώπου

Πλεονεκτήματα θεραπείας

- Απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες κάθε ηλικίας
- Είναι κατάλληλη για κάθε τύπο επιδερμίδας
- Μπορεί να διενεργηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους (ακόμη και το καλοκαίρι)
- Διαρκεί 20-30 min
- Έχει εμφανή αποτελέσματα ανώδυνα και με μηδενικό χρόνο αποθεραπείας
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε πρόσωπο και πλάτη
- Μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες θεραπείες (π.χ. Botox, Υαλουρονικό, θεραπεία αντιγήρανσης, προϊόντικές θεραπείες κ.α.) ή να προηγηθεί αυτών χωρίς πρόβλημα

Πριν και Μετά



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Ακροφύσιο Peeling	2 Μεγέθη
Εύρος αναρρόφησης Vacuum	Max 680 mmHg
Ραδιοσυχνότητα	1Mhz, Multi polar(6Pol)
Ιοντοφόρηση	500Hz (Digital Ion Lifting)
Υπέρηχος	1Mhz / 2W/cm2
Οθόνη	10" TFT
Τάση εισόδου	110V / 220V 50/60HZ
Επίπεδα θορύβου	45db
Λειτουργία υπερήχων	Συνεχής, Παλμός
Καθαρό βάρος	39KG
Μικτό βάρος	71KG
Διαστάσεις συσκευασίας	59x53x135cm

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος

DERMACON

Δελφών 5, Χαλάνδρι TK15233

T. 2106777540 E. dermacon@dermacon.gr